

3M™ Press-On™ Linser

Svensk

3M Press-On Linser är ytterst tunna Fresnellinser som är avsedda för användning vid försökspassning före och efter operationer, vid ändring av glasögonlinsernas styrka eller vid synterapi. Press-On Linser kan användas för att behandla flera besvär med ögonföreelser inklusive skelning.

Observera: Press-On Linser är inte avsedda för stötsäkra säkerhetsglasögon.

Varning:

- Undvik att utsätta den Press-On Linsen för damm, smuts, kemiska lösningar eller fetter vid applicering.
- Efter tillskärning skall linsen inte överlappa mot glasögats nedslipade kant eller nudda glasögonbågarna.
- Patienter skall informeras om att en Press-On Lins kommer att modifiera deras glasögon. Deras syn kan bli något annorlunda, speciellt vid ovanliga ljussituationer. De flesta patienterna anpassar sig snabbt till förändringen.

Instruktion för användning:

Press-On Linser kan appliceras på hela eller en del av glasögonlinsens inre yta.

1. Markera med en filtpena en punkt på patientens glasögon för att indikera den optiska mittpunkten för placering av den Press-On Linsen. Den optiska mittpunkten på den Press-On Linsen är den minsta koncentriska ringen. Bottenorienteringen på linsen är markerad med ordet "botten".
2. Den släta ytan skall vändas mot insidan av glasögats lins. Rikta in den optiska mittpunkten mot markeringen på glasögat. Passa försiktigt in den Press-On Linsen på avsedd plats.

Med glasögats lins borttagen från bågarna:

- 3a. Klipp den Press-On Linsen med en sax så att den passar glasögats lins så väl som möjligt. Håll ett rakblad i samma vinkel som den snedslipade kanten och skär Linsen försiktigt tills den är jämn med glasögonlinsens kant. Sätt tillbaka glasögonens linser i bågarna.

Med glasögats lins kvar i glasögonbågen:

- 3b. Använd en filtpena för att rita upp glasögonlinsens kontur på den Press-On Linsen alldeles innanför glasögonbågens kant. Avlägsna den Press-On Linsen från glasögats lins och klipp försiktigt innanför den ritade linjen.
4. Tvätta både glasögonens linser och den Press-On Linsen antingen under rinnande varmt vatten eller doppa ned dem i en skål med varmt vatten. För att avlägsna fett och smuts kan en svag lösning av diskmedel (utan balsam) användas. Torka bort alla luftbubblor från samtliga ytor.
5. Placera den Press-On Linsen med den släta ytan vänd mot insidan av glasögats lins. Avlägsna glasögonen från vattnet medan den Press-On linsen hålls på plats. Justeringar kan göras genom att försiktigt skjuta den Press-On linsen på plats.

Observera: När glasögonen har plastlinser, kan den Press-On linsen vara en aning svår att skjuta. Justering kan erfordra borttagande och återapplicering. Använd tummens undersida för att försiktigt avlägsna kvarblivande vattendroppar.

6. Inspektera kanterna på den Press-On linsen så att de inte täcker någon del av glasögonbågarna. Avlägsna och återapplicera om dammartiklar och luftbubblor (lätta att upptäcka mot en mörk bakgrund) har fångats mellan den Press-On linsen och glasögats lins.
7. Ombed patienten att behandla glasögonen mycket försiktigt de första 24 timmarna efter att de Press-On linserna har applicerats.
8. Svaga, grå fläckar kan uppstå. De är tillfälliga och försvinner vanligen när linserna har torkat fullständigt.